



## **ТЕСТ С СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА**

В 1997 году компания DNA Solutions создала страницу в Интернете [www.dnasolutions.ru](http://www.dnasolutions.ru), став первой в мире компанией, предложившей услугу “Домашний набор” посредством Интернета. Компания DNA Solutions (известная также как DNA Now) оказывает свои услуги более чем в 14-ти странах на протяжении уже более 7-ми лет, работая и предлагая поддержку на разных языках через представительства и лаборатории по всему миру, открытые для клиентов 24 часа в сутки. Постоянно совершенствуя исследования и развиваясь, DNA Solutions использует современные технологии в своих методах проведения анализа ДНК, привлекая к работе высококвалифицированных специалистов.

Набор, который вы держите в руке, содержит полную информацию, необходимую для того чтобы быстро и с высокой степенью точности провести тестирование ДНК с помощью одной из наиболее прогрессивных технологий и методологий анализа ДНК, существующих сегодня в мире.

## **ТЕСТ**

Тест ДНК проводится с помощью анализа определённого количества участков ДНК в пробе, которую вы нам вышлете. Каждый участок ДНК содержит большое количество комбинаций последовательностей ДНК. У настоящего биологического отца все комбинации последовательностей ДНК будут совпадать с теми, что взяты у ребёнка во всех тестируемых участках. Анализируя различные участки, мы получаем результат с высокой степенью точности, с двумя возможными выводами:

1. Не менее 2 последовательностей ДНК не являются равнозначными между собой (что доказывает отсутствие отцовства).
2. Все последовательности ДНК совпадают (что подтверждает факт отцовства).

## **СТОИМОСТЬ ТЕСТОВ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА**

Представляем для выбора три варианта теста на установление отцовства.

**Ниже дана стоимость теста для отца и одного ребёнка (и тестирование матери если предоставлена биологическая проба матери).**

1. Лёгкий тест 8950 руб. , 99.9% точности (с пробой матери или без неё)
2. Тест Premium: 9900 руб., 99.99% точности ( с пробой матери или без неё)
3. Super Тест 11500 руб. , 99.9999% точности (с пробой матери или без неё)

Точность результатов вашего теста может быть увеличена если это необходимо во время проведения теста или не задолго после получения результата.

Для Лёгкого Теста и Теста Premium стоимость тестирования каждого дополнительного ребёнка (или предполагаемого отца) составляет 3300 руб.

Для Super Теста стоимость тестирования каждого дополнительного ребёнка (или отца) составляет 3300 руб.



#### 4. **Тест имеющий юридическую силу 16600 уб.** (необходимо также предоставить пробы матери)

Это комплексный тест, результаты которого признаются законом. Все пробы берутся лицами, уполномоченными на то и только в специализированных клиниках, сотрудничающих с DNA Solutions, без какой-либо дополнительной оплаты. Для проведения такого теста требуются пробы ДНК отца, ребёнка и матери. В случае возникновения необходимости проведения теста имеющего юридическую силу, либо в случае когда этот тип теста наиболее соответствует вашей ситуации, свяжитесь с нами по телефону (812) 346 78 78, и мы вышлем вам специальный формуляр (отличный от представленного ниже) и направим в соответствующую клинику для сдачи проб.

### **ДРУГИЕ ТИПЫ ТЕСТОВ**

Если необходимо провести другие типы тестов, отличающиеся от представленных здесь, имеющих целью проверить другие степени кровного родства (например, двое лиц мужского пола хотят проверить, являются ли они братьями, или нужно подтвердить наличие кровного родства между бабушкой и внуком), свяжитесь с нами, чтобы обсудить специфические тесты, процедуру их проведения и стоимость.

### **ВЗЯТИЕ ПРОБ**

Существуют многочисленные типы проб, применяемых для проведения тестов. Наиболее распространённый и широко известный – это метод с применением гигиенических палочек (берутся клетки слизистой из полости рта).

Пробы, после их получения могут сохраняться в течение длительного времени, т.е. ДНК остаются в пробе (волос или клеток слизистой из полости рта) на протяжении недель, месяцев, даже года. Это значит также, что пробы могут быть переправлены на большие расстояния. От одного лица берётся только один вид пробы (т.е. если у ребенка взята проба клеток слизистой из полости рта, не нужно брать ещё и пробу волос).

Как правило, родители стараются брать пробы тактично, избегая стресса или беспокойства, ненужного ребёнку. Если возникнет трудность с взятием пробы из полости рта или волос, можно использовать другие типы проб (например, обрезки ногтей, зубную щётку, пластырь и т.д.). В таких случаях следует связаться с нами по телефону, чтобы обсудить, какой метод является наилучшим.

**Пробы следует высылать по адресу:**

**DNA Solutions, а/я 6894 г. Львов 79058 Украина**



## **ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

**ЭТОТ НАБОР СОДЕРЖИТ: ФОРМУЛЯР ДЛЯ ПРОБ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОТЕСТИРОВАНЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА.** Необходимо представить

информацию только о лицах, проходящих тестирование. Напишите в формуляре имя и фамилию отца в том же виде, как они написаны на этикетке пробы. Затем укажите данные сына или дочери и данные матери, если она тоже проходит тестирование. В формуляре можно выбрать форму получения результатов (электронная почта, факс, и т.д.) В случае, если результаты следует выслать по двум разным адресам, укажите фамилии получателей.

**ФОРМУЛЯР ДЛЯ ПРОБ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА** содержит различные типы тестов и формы оплаты. Прочитайте и подпишите УСЛОВИЯ проведения теста. Вышлите пробы, которые будут протестированы на установление отцовства и **ФОРМУЛЯР ДЛЯ ПРОБ**, а также оплату за тест в DNA Solutions.

Анкета, приложенная к набору, используется для определения круга лиц, проходящих тестирование. Эта анкета является абсолютно конфиденциальной и будет использована исключительно в статистических целях. Мы заранее благодарны за сотрудничество при заполнении анкеты.

## **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ**

Компания DNA Solutions чрезвычайно щепетильно относится к вопросам доверия клиента и сохранения конфиденциальности результатов проводимых тестов. Ни в коем случае информация не будет доведена до третьих лиц, без предварительного согласия клиента. В случае, если у вас возникнут какие-либо сомнения, свяжитесь с нами.

## **ПОРЯДОК ВЗЯТИЯ ПРОБ ВОЛОС**

1. Напишите на этикетках маленьких пластиковых упаковок дату и данные лиц, которые будут протестированы, например: Отец: Николай Петров, Сын: Виктор Петров. Проверьте, соответствует ли надпись на упаковке данным, указанным в **ФОРМУЛЯРЕ ДЛЯ ПРОБ**.
2. Вырвите **НЕ МЕНЕЕ 6** волос с головы, или из бровей, из подмышки и т.п. вместе с луковицами волос. Эту процедуру можно выполнить при помощи пинцета или просто пальцами, вырывая волос быстрым движением руки. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАСАЙТЕСЬ** кончика волоса - места, где находится луковица (это клетки кожи содержащие ДНК). При этой процедуре очень важно, чтобы луковица осталась на кончике волоса. Убедитесь, что волос **НЕ ОБОРВАН**, а вырван целиком ( "с корнем" ). **ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО**. Луковица видна невооруженным глазом на кончике вырванного волоса в виде утолщения.  
В случае тонких, седых волос, их полном отсутствии, или когда луковица не видна, рекомендуется применение метода взятия проб из полости рта.



**3. Немедленно вложите волосы в пластиковый мешочек с данными лица, у которого взята проба.**

Безотлагательно вложив волосы в пластиковый мешочек, закройте его. При такой упаковке нет риска, что кто-либо дотронется до луковицы, и упакованные волосы будут сохранены от любых повреждений.

**ПОРЯДОК ВЗЯТИЯ ПРОБ ИЗ ПОЛОСТИ РТА**

В описанных выше случаях тонких, рвущихся волос, полностью седых волосах или их полном отсутствии, рекомендуем использование метода взятия проб из полости рта. Не обязательно, чтобы все тестируемые лица использовали этот метод – ДНК идентична в каждой клетке тела.

1. Заполните этикетку на упаковке, в которой находится щёточка, вписав данные лица, проходящего тестирование.
3. Чистыми руками достаньте щёточку из упаковки. **НЕ КАСАЙТЕСЬ** волосков щёточки.
4. Слегка потрите щёточкой по внутренней стороне щеки примерно в течение 6 секунд. Используя ту же щеточку, повторите эту процедуру на внутренней стороне другой щеки.  
**Важно: следует проводить эту процедуру осторожно, особенно с маленькими детьми, поскольку на конце щёточки есть небольшая металлическая деталь.**
5. После взятия пробы немедленно вложите использованную щёточку в пластиковую упаковку.

**Внимание: Не обязательно использовать один и тот же метод взятия проб для всех лиц, проходящих тестирование, поскольку ДНК идентичны в каждой клетке тела.**



## ФОРМУЛЯР ДЛЯ ПРОБ, ВЗЯТЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА.

Впишите те же данные, которые использованы для обозначения проб.

Отец \_\_\_\_\_ Этническое Происхождение Отца \* \_\_\_\_\_  
Мать \_\_\_\_\_ Этническое Происхождение Матери \* \_\_\_\_\_  
Сын (Сыновья) \_\_\_\_\_  
Дочь (Дочери) \_\_\_\_\_

\* Этническое происхождение указывается исключительно для проведения специфического научного анализа. Пожалуйста укажите страну или этнические корни семьи, например: Россия, Украина, Польша и т.д. В случае если вы не имеете таких данных, укажите: “неизвестно”.

### ВЫБЕРИТЕ ТИП ТЕСТА:

- Лёгкий Тест: \_\_\_\_\_ руб. ( не менее 99,9% точности)
- Тест Premium \_\_\_\_\_ руб. ( не менее 99,99% точности)
- Super Тест \_\_\_\_\_ руб. ( не менее 99,9999% точности)
- Тестирование дополнительного лица (дополнительных лиц) - отца или ребёнка - ( Лёгкий Тест или Тест Premium) – дополнительно \_\_\_\_\_ руб.
- Тестирование дополнительного лица (дополнительных лиц) – отца или ребёнка - (Super Тест) - дополнительно \_\_\_\_\_ руб.
- Комплексная распечатка кода ДНК ( дополнительно \_\_\_\_\_ руб.)

Если вы желаете выполнить какой-либо другой тип теста кровного родства (например, между братьями) заполните эту строку:

- Тест кровного родства \_\_\_\_\_ руб. между ..... х .....

### СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

- В течение 2 - 3 недель (обычный срок без доплаты)
- В течение 6 рабочих дней (дополнительно \_\_\_\_\_ руб.)



**УКАЖИТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ**

Фамилия  
(Фамилии) \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

Почтой (адрес) \_\_\_\_\_

УКАЖИТЕ ПАРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ \_\_\_\_\_  
(для соблюдения конфиденциальности при получении результата по телефону)

**ВЫБЕРИТЕ ФОРМУ ОПЛАТЫ**

Оплата полностью \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

Форма оплаты:

- VISA
- MasterCard
- American Express
- Наличными
- Денежным переводом

Номер кредитной карточки \_\_\_\_\_

Срок действия \_\_\_\_\_

Фамилия в форме, указанной на карточке \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**Внимание: Просьба ознакомиться и подписать Условия проведения теста.  
Результаты теста в письменной форме будут переданы клиенту только при наличии этой подписи.**



## **УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА**

1. DNA Solutions гарантирует что результат анализа доставленных к нам биологических проб соответствует действительности, хотя и допускает ошибку величиной 0.001%. Мы не принимаем никаких претензий, гарантийных требований или какой-либо ответственности в связи с результатом анализа.
2. Информация, полученная в результате анализа биологических проб, предназначена исключительно для использования клиентом, предоставившим эти пробы в DNA Solutions.
3. В маловероятном случае подтверждения ошибки в результатах анализа, все суммы, уплаченные за выполненные исследования будут возвращены. Как альтернативный вариант, может быть выполнен повторный анализ без дополнительной оплаты.
4. DNA Solutions не несёт ответственность за потери или ущерб, понесенные клиентом или любым другим лицом в связи с информацией, полученной в результате анализа.
  
5. DNA Solutions не будет делать никаких заявлений, предполагающих, что результаты теста могут быть использованы для каких-либо целей. Если результаты анализа предполагается использовать в судебном процессе, клиенту самому следует обеспечить независимую юридическую оценку своих прав и юридических гарантий, а также средств использования результатов анализа.
6. Клиент гарантирует, что он несёт юридическую ответственность за доставленные пробы. Клиент согласен на возмещение DNA Solutions любых возможных потерь или ущерба, которые могут возникнуть в случае, если доставленные пробы были получены противоправным путем. Клиент должен сам обеспечить себе независимую юридическую помощь в случае возникновения ответственности за сбор и передачу проб биологических материалов для других лиц. DNA Solutions не делает никаких заявлений, юридически обосновывающих и уполномочивающих клиента на получение таких проб.

**Я согласен/согласна со всеми условиями, изложенными в данном документе и подтверждаю достоверность поданной мной информации.**

Имя и фамилия (разборчиво, печатным шрифтом) \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**Из соображений безопасности и конфиденциальности, по телефону результат анализа будет передан только если будет назван указанный вами пароль безопасности:**

**ПАРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ** \_\_\_\_\_